



GENV

مو معتقدیم که مشکلات بهداشتی دوران کودکی قابل حل است.

## دستور العمل سواب پمپر (لاته) GenV

جمع آوری نمونه مدفوع نوزاد شمو

- قبل از ای که تو شروع که نی

• لطفا این دستور العمل ها ره بخوانید


• نوزاد کمتر از یک هفته؟ نمونه ره ده سن 7 روزگی یا ده اسرع وقت بعد از آن جمع آوری که نید.

• نوزاد بیش از یک هفته سن ده ره؟ نمونه ره ده اسرع وقت جمع آوری که نید همانطور که میتانی.

• جمع آوری ره فراموش که دید یا سخت است؟ نمونه خود ره ده هر زمان برگردانید - هر نمونه مهم است.

• کیت ره گم که دید یا اشتباه که دید؟ - قدی از مو تماس بیگیرید:

تلفون: 1800 436 888 وبسایت: [www.genv.org.au](http://www.genv.org.au)

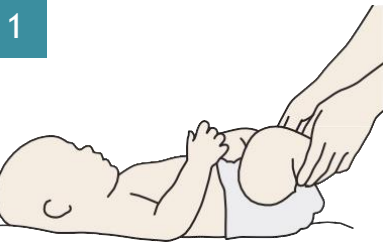


1

- شمو نیاز خواهید داشت:
- 1. این دستور العمل ها،
- 2. کیت سواب پمپر (لاته) از شمو، و
- 3. یک قلم
- پمپر (لاته) چنل نوزاد خوره البیش که نید
- پمپر (لاته) چنل ره ده یک طرف قرار بید تا زمانی که نوزاد شمو ده موقعیت امنی قرار بگیره (مثلا گهواره)


2

- لاته چنل ره روی یک سطح سخت باز که نید
- لوله ره تاو داده و بکشید تا باز شوه، تا نوک سواب آزاد شوه
- مراقب به شید که نوک سواب ره روی پوست یا هر سطح دیگری لمس نه که نید

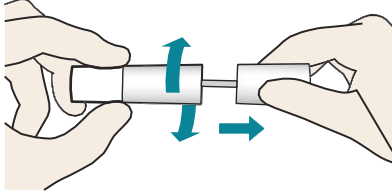


3

- ده آرامی نوک سواب ره لمس که نید تا لکه کوچکی از مدفوع از پمپر (لاته) چنل برداشته شوه

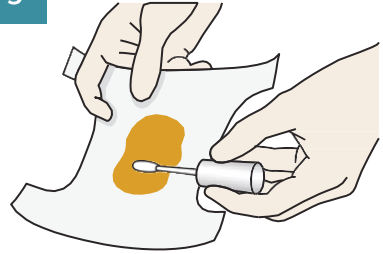


4

- زیاد آو نخورید
- نوک سواب فقط باید کمی رنگ شوه

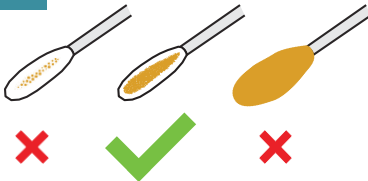


7

- لوله ره داخل کیسه سفید قرار بید
- لبه های کیسه ره ده هم فشار بید تا ده کمترین هوای ممکن بسته شوه

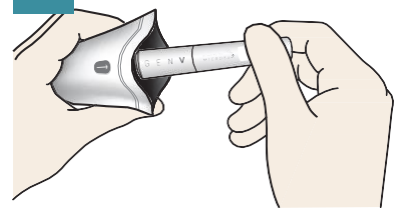

5

- سواب ره مستقیماً داخل لوله قرار بید
- اجازه نه دید نوک سواب ده پوست یا هر سطح دیگری برخورد که نه
- بررسی که نید که محکم بسته شده باشد

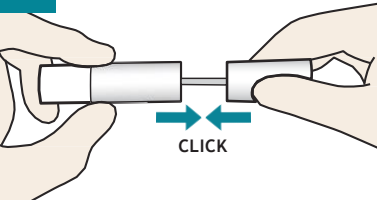


8

- کیسه سفید ره ده پاکت پاسخ رهی که نید
- پاکت ره مهر و موم که نید
- می تانه ده دمای اتاق باشد (نه ده یخچال یا فریزر)



6

- تاریخ ره روی لوله نوشته که نید، جایی که موگه "تاریخ جمع آوری" ("Date collected")

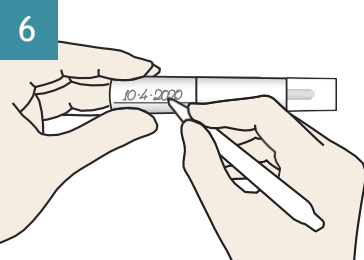

9

- پاکت ره ده عرض یک هفته یا ده اسرع وقت ده GenV ارسال که نید - آن ره ده هر صندوق پستی استرالیا بیندازید، بدون نیاز به مهر

