



GENV

ما معتقدیم که مشکلات بهداشتی دوران کودکی قابل حل است.

دستور العمل سواب پوشک GenV


جمع آوری نمونه مدفوع نوزادان

- پیش از آنکه شروع کنید


- لطفاً این دستور العمل را بخوانید
- نوزاد کمتر از 7 روزه است؟ نمونه را در 7 روزگی یا در اسرع وقت بعد از آن بگیرید
- سن نوزاد از یک هفته بیشتر است؟ نمونه را در اولین فرصت ممکن بگیرید
- فراموش کردید یا نمونه گیری سخت است؟ نمونه تان را هر وقت شد بفرستید. هر نمونه‌ای مهم است
- کیت را گم کرده اید یا اشتباه کرده اید؟ - با ما تماس بگیرید:

تلفن: 1800 436 888 وبسایت: www.genv.org.au


- 1 این چیزها را لازم خواهید داشت:
- این دستور العمل ها،
 - کیت سواب پوشک، و
 - یک قلم
- پوشک کثیف نوزادان را عوض کنید
 - پوشک کثیف را در یک طرف قرار دهید تا زمانی که کودک شما در موقعیت امنی قرار گیرد (مثلاً در گهواره)

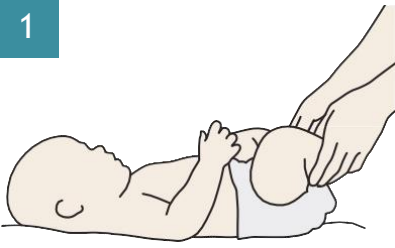


- 2 پوشک کثیف را روی یک سطح سفت باز کنید
- لوله را بچرخانید و بکشید تا باز شود طوری که نوک سواب آزاد باشد
 - مراقب باشید که نوک سواب با پوست شما یا هر سطح دیگری تماس پیدا نکند

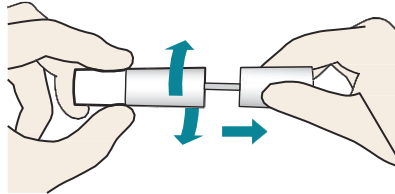


- 3 به آرامی با نوک سواب لکه کوچکی از مدفوع را از پوشک کثیف بردارید

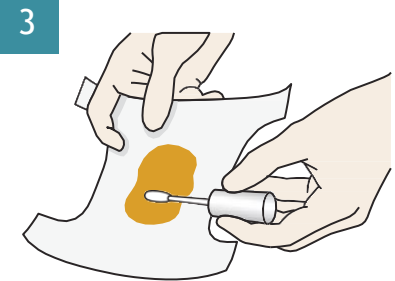


- 4 مدفوع زیادی بر ندارید
- نوک سواب فقط باید کمی رنگی شود

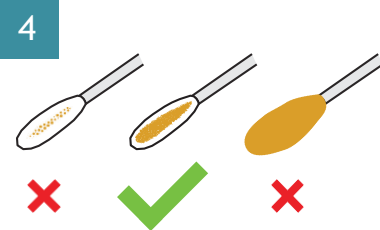


- 5 سواب را بلافاصله داخل لوله بگذارید
- اجازه ندهید نوک سواب به پوست شما یا هر سطح دیگری بخورد
 - لوله را محکم ببندید

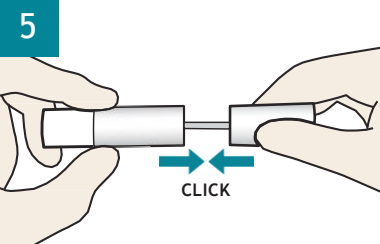

- 6 تاریخ را روی لوله، در جایی که نوشته "تاریخ جمع آوری" بنویسید ("Date collected")

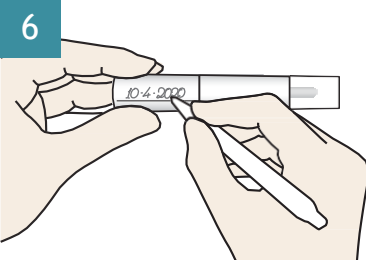

- 7 لوله را داخل کیسه سفید قرار دهید
- لبه های کیسه را به هم فشار دهید تا با کمترین هوای ممکن بسته شود

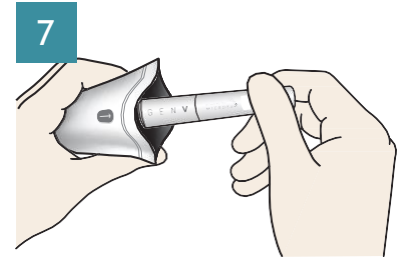

- 8 کیسه سفید را در پاکت که هزینه تمبر آن پرداخته شده است بگذارید
- پاکت را ببندید
 - می تواند در دمای اتاق بماند (نه در یخچال یا فریزر)



- 9 پاکت را در عرض یک هفته یا در اسرع وقت به GenV ارسال کنید - آن را در هر صندوق پست استرالیا بیندازید، بدون نیاز به تمبر

