

குழந்தைப் பருவ உடல்நலப் பிரச்சினைகளை தீர்க்க முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.



GenV Nappy Swab அறிவுறுத்தல்கள்


G E N V

உங்கள் குழந்தையின் மல மாதிரியை சேகரித்தல்

- நீங்கள் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்


- இந்த அறிவுறுத்தல்களைப் படிக்கவும்
- ஒரு வாரத்திற்கும் குறைவான வயதுடைய குழந்தையா? குழந்தை பிறந்து 7 நாட்கள் ஆகும் போது மாதிரியை சேகரியுங்கள், அல்லது அதன் பிறகு உங்களால் முடிந்தவரை விரைவில் சேகரியுங்கள்.
- குழந்தை பிறந்து ஒரு வாரத்திற்கு மேல் ஆகிறதா? உங்களால் முடிந்தவரை விரைவாக மாதிரியை சேகரியுங்கள்
- மறந்துவிட்டீர்களா அல்லது சேகரிக்க கடினமாக உள்ளதா? எந்த நேரத்திலும் உங்கள் மாதிரியை அனுப்பிவைப்பது-ஒவ்வொரு மாதிரியும் முக்கியமானது
- Kit தொலைந்துவிட்டதா அல்லது சரியான முறையில் பயன்படுத்தவில்லையா? - எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்: தொலைபேசி: 1800 436 888 இணையதளம்: www.genv.org.au

1

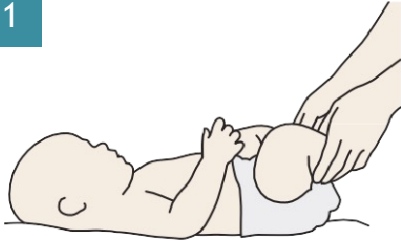


- உங்களுக்குத் தேவையானவை:
 - இந்த அறிவுறுத்தல்கள்,
 - உங்களது nappy swab kit, மற்றும்
 - ஒரு பேனா
- உங்கள் குழந்தையின் அழுக்கு நாப்பியை மாற்றவும்
- உங்கள் குழந்தை பாதுகாப்பான நிலைக்குத் திரும்பும் வரை (உதாரணமாக தொட்டில்), அழுக்கு நாப்பியை ஒரு பக்கத்தில் வைக்கவும்

2

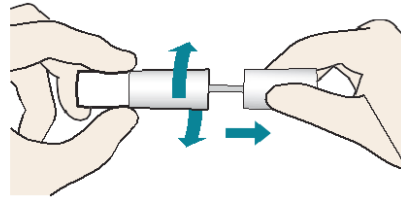


- அழுக்கு நாப்பியை உறுதியான மேற்பரப்பில் வைத்து திறக்கவும்
- குழாயைத் திருகி, இழுத்து திறக்கவும். இவ்வாறு செய்வதால் swab-ஐ வெளியே எடுக்கலாம்
- உங்கள் தோல் அல்லது வேறு எந்த மேற்பரப்பிலும் swab நுனி தொடாதவாறு கவனமாக இருங்கள்

3

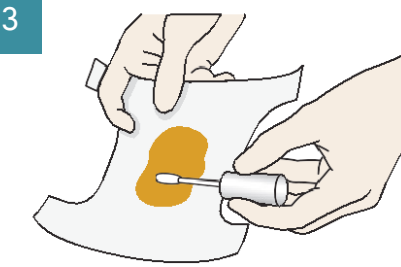

- அழுக்கு நாப்பியிலிருந்து மலத்தின் சிறிதளவு மாதிரியை எடுப்பதற்காக swab நுனியால் லேசாகத் தொடவும்

4

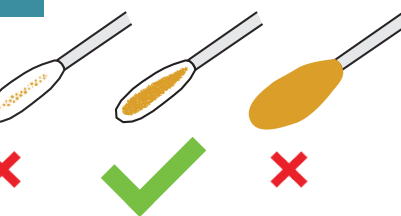

- அதிகளவு மலத்தை எடுக்க வேண்டாம்
- Swab நுனியில் மலத்தின் நிறம் சிறிதளவு தெரியக்கூடியதாக இருந்தால் போதும்

V2.0 2022-05-20

அடுத்த தலைமுறையை முன்னெப்போதும் இல்லாதவகையில் ஆரோக்கியமானவர்களாக மாற்ற உதவுகின்றமைக்கு நன்றி.




குழந்தைப் பருவ உடல்நலப் பிரச்சினைகளை தீர்க்க முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.



GenV Nappy Swab அறிவுறுத்தல்கள்


G E N V

5

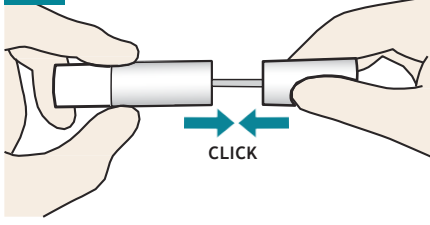


- Swab-ஐ உடனடியாக குழாயினுள் திரும்பவைத்துவிடுங்கள்
- உங்கள் தோல் அல்லது வேறு எந்த மேற்பரப்பிலும் swab நுனி தொடுவதற்கு அனுமதிக்காதீர்கள்
- குழாயை இறுக்கமாக மூடுங்கள்

6

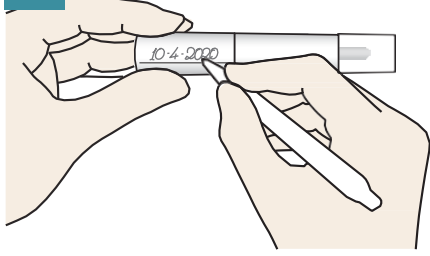

- குழாயில் 'சேகரிக்கப்பட்ட தேதி' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடத்தில் தேதியை எழுதுங்கள் ('Date collected')

7

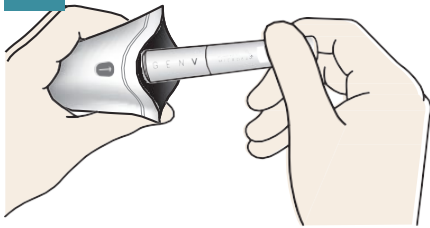


- குழாயை வெள்ளைப் பையில் வைக்கவும்
- முடிந்தவரை பையினுள் காற்று இல்லாதவாறு மூடும்வகையில் பையின் விளிம்புகளை ஒன்றாக அழுத்தவும்

8



- ஏற்கனவே தபால் கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட உறையில் வெள்ளைப் பையை வைக்கவும்
- உறையை சரியாக மூடி ஒட்டவும்
- இது அறை வெப்பநிலையில் வைக்கப்படலாம் (குளிர்சாதனப்பெட்டி அல்லது freezer-இல் அல்ல)

9

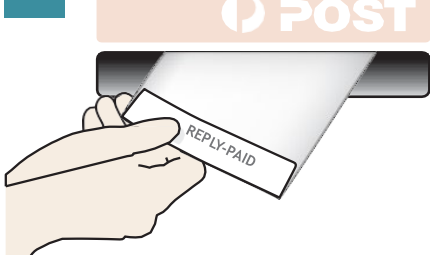

- ஒரு வாரத்திற்குள் அல்லது கூடிய விரைவில், உறையை GenVக்கு தபால் மூலம் அனுப்பவும் - அதை எந்த Australia Post பெட்டியிலும் போடலாம், முத்திரை தேவையில்லை

அடுத்த தலைமுறையை முன்னெப்போதும் இல்லாதவகையில் ஆரோக்கியமானவர்களாக மாற்ற உதவுகின்றமைக்கு நன்றி.

V2.0 2022-05-20

