



- 1. سوف تحتاج:  
هذه التعليمات،  
مجموعة مسح الحفاض  
قلم  
غير حفاض طفلك المتسخ
- ضع الحفاض المتسخ على جنب حتى  
يعود طفلك إلى مكان آمن (مثل السرير)

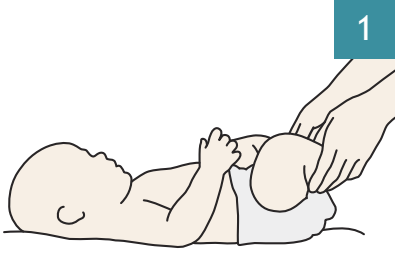


1

- افتح الحفاض المتسخ على سطح ثابت
- ايرم الأنبوب واسحبه ليفتح، بحيث  
يكون طرف الماسحة في الخارج
- احرص على عدم لمس طرف الماسحة  
على جلدك أو أي سطح آخر

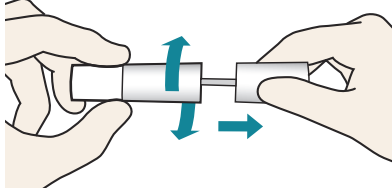


2

- المس بلطف طرف الماسحة لالتقاط  
لطفة صغيرة من البراز من الحفاض  
المتسخ
- حاول ألا تدع طرف الماسحة يلمس  
الحفاض مباشرة

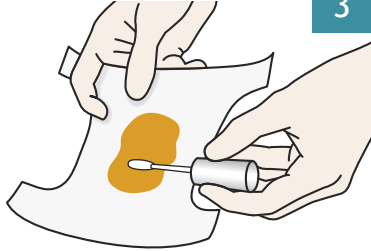


3

- لا تأخذ الكثير من البراز
- يجب تلوين طرف الماسحة قليلاً فقط

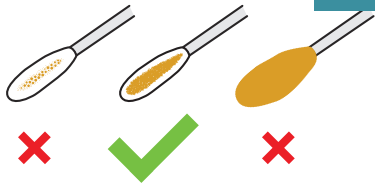


4

- ضع المسحة مباشرة في الأنبوب
- لا تدع طرف الماسحة يلمس جلدك أو  
أي سطح آخر
- اغلق الأنبوب بإحكام

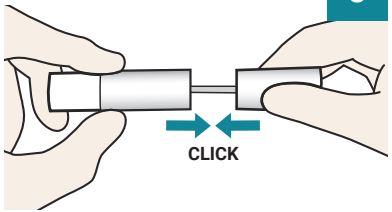


5

- اكتب التاريخ على الأنبوب، حيث يوجد  
"Date Collected"

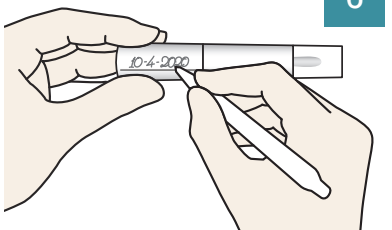

6

- ضع الأنبوب في الكيس الأبيض
- اضغط أطراف الكيس معاً لإغلاقه، بأقل  
قدر ممكن من الهواء

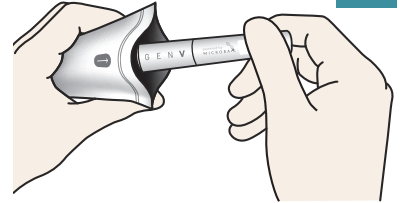


7

- ضع الكيس الأبيض في الظرف المدفوع  
أجرة بريده سلفاً
- سد الظرف
- يمكن أن يبقى ضمن درجة حرارة الغرفة  
(ليس في البراد أو التلاجة)



8

- أرسل الظرف إلى GenV في غضون  
أسبوع، أو في أقرب وقت ممكن -  
ضعه في أي صندوق بريد أسترالي، لا  
حاجة إلى طابع بريدي

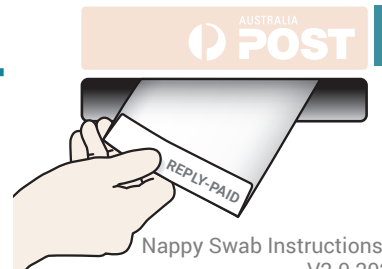

9

Nappy Swab Instructions - Arabic  
V2.0 2022-05-20

نعتقد أنه يمكن حل مشاكل الطفولة الصحية.

## تعليمات مسحة حفاض GenV

جمع عينة براز طفلك  
- قبل ان تبدأ

- يرجى قراءة هذه التعليمات
- الطفل لم يعد يرتدي حفاضات؟ خذ كمية صغيرة مباشرة من البراز أو ورق  
التواليت/المناديل المبللة. استخدم المسحة المقدمة للقيام بذلك
- نسيت أو يصعب جمعها؟ اعد عينتك في أي وقت - كل عينة مهمة
- هل فقدت اللوازم أو ارتكبت خطأ؟ - اتصل بنا:  
هاتف: 1800 436 888 موقع إلكتروني: [www.genv.org.au](http://www.genv.org.au)